



	機能	ボード	91cm幅※	83cm幅※	TAISコード				
			製品コード	製品コード					
3モーター	 らくらく モーション	 背あげ 0~75°	 膝あげ 0~30°	 高さ調節 25~60cm	 ベッド操作 アプリ対応	樹脂製ボード	KQ-B6321	KQ-B6301	00170-001521
						木製ボード[スクエア]	KQ-B6327	KQ-B6307	00170-001523
						木製ボード[グリップ]	KQ-B6326	KQ-B6306	00170-001522
2モーション	 2モーション 連動	 背あげ 0~75°	 膝あげ 0~20° (2モーション連動)	 高さ調節 25~60cm	 ベッド操作 アプリ対応	樹脂製ボード	KQ-B6421	KQ-B6401	00170-001533
						木製ボード[スクエア]	KQ-B6427	KQ-B6407	00170-001535
						木製ボード[グリップ]	KQ-B6426	KQ-B6406	00170-001534
2モーター	 背あげ 0~75°	 膝あげ 0~12° (背膝連動)	 高さ調節 25~60cm	 ベッド操作 アプリ対応	 ベッド操作 アプリ対応	樹脂製ボード	KQ-B6221	KQ-B6201	00170-001524
						木製ボード[スクエア]	KQ-B6227	KQ-B6207	00170-001526
						木製ボード[グリップ]	KQ-B6226	KQ-B6206	00170-001525
1モーター (背タイプ)	 背あげ 0~75°	 膝あげ 0~12° (背膝連動)	25・29・33cm (組み替え可能)	 ベッド操作 アプリ対応	 ベッド操作 アプリ対応	樹脂製ボード	KQ-B6121	KQ-B6101	00170-001527
						木製ボード[スクエア]	KQ-B6127	KQ-B6107	00170-001529
						木製ボード[グリップ]	KQ-B6126	KQ-B6106	00170-001528
1モーター (高さタイプ)	 高さ調節 25~60cm	 ベッド操作 アプリ対応	 ベッド操作 アプリ対応	 ベッド操作 アプリ対応	 ベッド操作 アプリ対応	樹脂製ボード	KQ-B6021	KQ-B6001	00170-001530
						木製ボード[スクエア]	KQ-B6027	KQ-B6007	00170-001532
						木製ボード[グリップ]	KQ-B6026	KQ-B6006	00170-001531

※クオラONEは全機種オープン価格、1モーター(高さタイプ)を除き非課税です。※91cm幅用のボードと83cm幅用のボードではサイズが異なります。必ずベッド本体で設定した幅に合わせたボードを取り付けてください。

■寸法表

	91cm幅	83cm幅
樹脂製ボード	①99.9cm ②209.6cm(ミニ198.6cm) ③25～60cm※ ④39cm ⑤39cm	①92.9cm ②209.6cm(ミニ198.6cm) ③25～60cm※ ④39cm ⑤39cm
木製ボード [スクエア][グリップ]	①99.9cm ②201.7cm(ミニ190.7cm) ③25～60cm※ ④40cm ⑤40cm	①92.9cm ②201.7cm(ミニ190.7cm) ③25～60cm※ ④40cm ⑤40cm

※1モーター(背タイプ)は、25cm・29cm・33cm

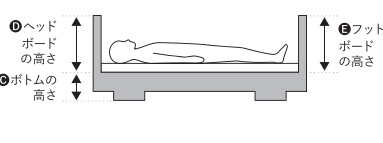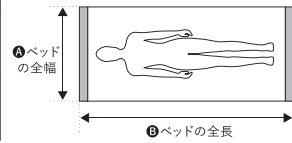

JIS T 9254
JIS JQA JQ0308178

JIS
(認証機関名) JQA 一般財団法人 日本品質保証機構

産業標準化法に基づくJISマーク表示制度において
次の登録認証機関が規格適合したことを認証した商品

パラマウントベッド株式会社

ホームページURL www.paramount.co.jp

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11

仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3
さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1
横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号
名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号
大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号
高松営業所 〒761-8031 高松市郷東町223番1
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号

022(239)5211(代)
048(878)0100(代)
042(795)8800(代)
052(963)0600(代)
06(6443)8791(代)
087(881)8900(代)
082(293)1311(代)
092(461)1131(代)

製品のお求め、ご相談は……

●製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
●最新の情報はホームページでご確認いただけます。

2022年 希望小売価格改訂版 I22-C00807



as human, for human
PARAMOUNT BED

クオラONE

ONE
for ALL
パラマウントベッド株式会社

クオラONEなら、ひとつのボタン操作から、生活が広がっていきます。

ワンボタンで背あげと膝のあげさが連動し、身体のずれをおさえながら起きあがれます。

3モーター

らくらくモーション



身体がずれないように、背と膝が同時にあがり始めます。



膝が28°で停止し、背はそのままあがり続けます。



背が40°になると膝をさげ始めて、腹部の圧迫感を軽減します。



背があがりきると同時に膝が水平になり、安定した姿勢で起きあがれます。

2モーション

2モーション連動



身体がずれないように、背と膝が同時にあがり始めます。



背と膝が20°になると膝をさげ始めて、腹部の圧迫感を軽減します。



背が40°まであがると膝が水平になるので、背をあげきらない状態でも離床しやすくなります。

2モーター

1モーター(背タイプ)

新機構 2モーター/1モーターでも膝が水平

背膝連動

に戻るようになりました。



身体がずれないように、背と膝が同時にあがり始めます。膝は12°で停止します。



背が20°になると膝がさがり始めて、背はそのままあがり続けます。





背をあげ続けながら膝をさげ、腹部の圧迫感を軽減します。



背が止まると同時に膝が水平になり、安定した姿勢で起きあがれます。

ここが、パラマウントベッド！

ストレッチ背あげ

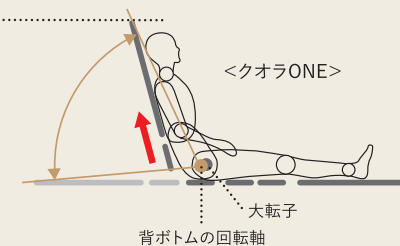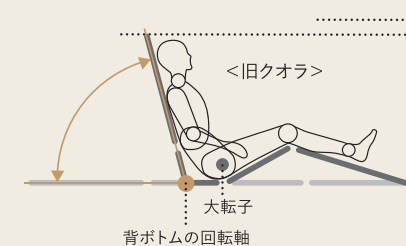

単に背ボトムをを起こすのではなく、やや伸びあがるように起こすことで背ボトムと身体の回転軸が近くなり、背あげによる圧迫感や姿勢のずれを軽減します。

ソフトストップ制御

急始動・急停止する感じや振動を抑えて、ベッドの動きが穏やかでやさしく感じられるように、背・膝・高さのあげ下げなどの動き始めと止まる前の速さを自動制御しています。

定速制御

ベッドの高さを調節するときに、利用者様に不自然な感じを与えにくいやさしい動きにするために、お使いになる方の体重にかかわらず、動作中の速さが変わらないように制御しています。

一旦停止機能

ベッドの高さをさげるときに足や周辺の商品を挟まないように、ボトムの高さが32cmになるとブザーを鳴らして一旦停止します。ボタンを押しなすと、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低位(25cm)まで通常よりもゆっくりとさがります。

高さ調節

<最低床高>



<最高床高>



クオラONEなら、さまざまな用途やお部屋にフィットします。

用途に合わせて5タイプからお選びいただけます。

	3モーター	2モーション	2モーター	1モーター (背タイプ)	1モーター (高さタイプ)
連動	らくらくモーション	2モーション連動	背膝連動	背膝連動	—
背あげ	0～75°	0～75°	0～75°	0～75°	—
膝あげ	0～30°	0～20° (2モーション連動使用時)	0～12° (背膝連動使用時)	0～12° (背膝連動使用時)	—
高さ調節	25～60cm	25～60cm	25～60cm	25・29・33cm (組み替え可能)	25～60cm
手元スイッチ					

目的やお好みで選べる3タイプのボードをご用意しています。



樹脂製ボード [収納付き]

両端にグリップを設けた軽量タイプ。便利な収納も付いています。



木製ボード [スクエア]

美しい木目とシンプルな形状が、さまざまなインテリアにマッチします。




木製ボード [グリップ]

壁ぎわに寄せて設置しやすいように、グリップを片側に付けています。

ヘッドボードとフットボードを入れ替えることで、グリップの左右が変わります。壁付けの向きに合わせて取り付けてください。


お使いになる方の体格やお部屋に合わせてサイズを変えられます。

※91cm幅用のボードと83cm幅用のボードではサイズ異なります。必ずベッド本体で設定した幅に合わせたボードを取り付けてください。

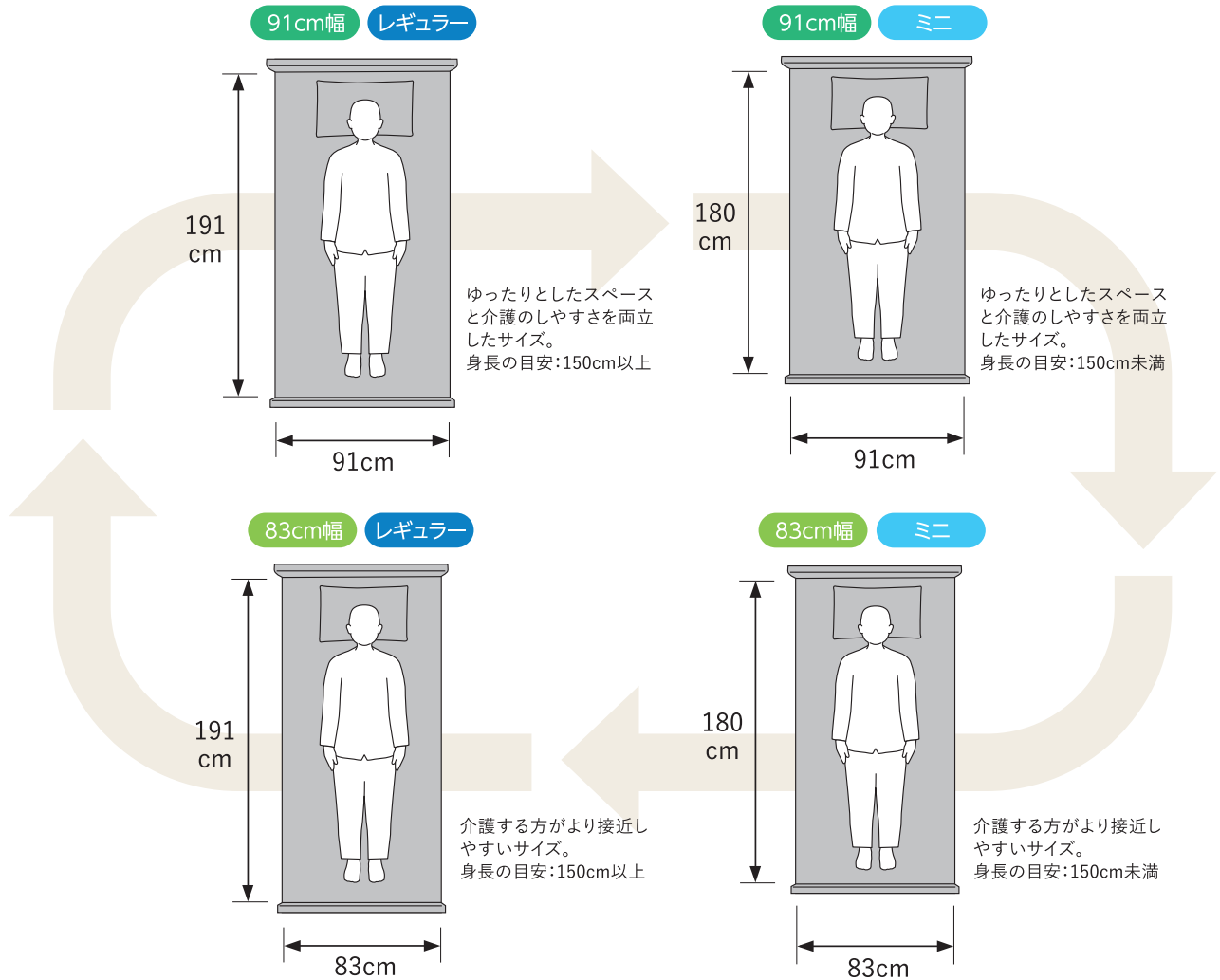


※表記した寸法は適合するマットレスのサイズです。

長さの調節

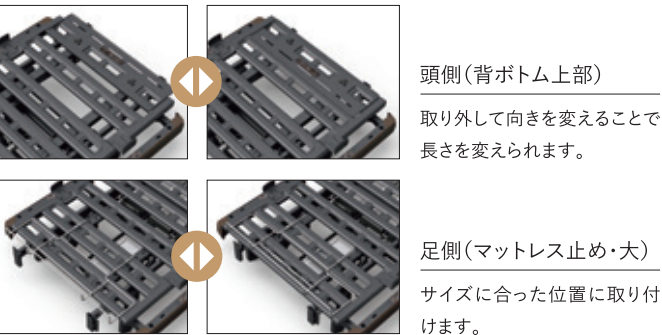

幅の調節

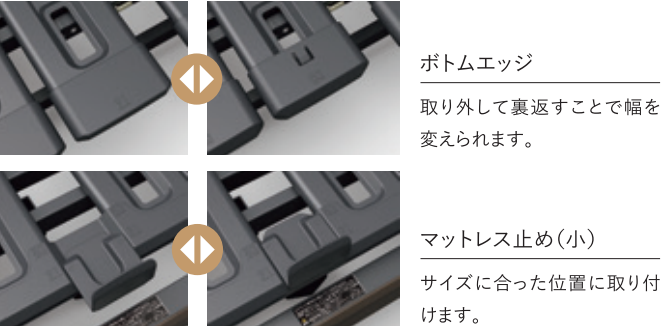

格納式オプション受け

オプション製品を使用しないときにはオプション受けをボトムの下に格納できます。オプション受けを格納するとベッドの側面に出っ張りが無くなるので、足が降りやすくなったり、車椅子をより近づけやすくなったりします。また、より壁に寄せてベッドを設置することができます。

クオラONEなら、スマートフォンで家族とつながります。




「呼出ボタン」で、ご家族のスマートフォンに通知できます。

手元スイッチの「呼出ボタン」を押すことで、無線(Bluetooth)が届く範囲にあるスマートフォン*に通知できます。

※専用の「ベッド操作アプリ」をインストールしたスマートフォンをベッドに登録する必要があります。ベッド1台に対してスマートフォンは3台まで登録できます。スマートフォンで通知を受信するにはスマートフォンの電源を入れておく必要があります。通知を受信したときの音やバイブレーション、画面表示などは、スマートフォンの機種や設定によって異なります。また、スマートフォンの設定やアプリの状態によっては、通知が正しく受信できない場合があります。詳しくは「ベッド操作アプリ」内のヘルプをご覧ください。
※ベッドからの呼出機能は、緊急時の使用を目的としたものではありません。※スマートフォンとの連携および呼出機能については、JIS認証範囲外となります。

ご家族も、自分のスマートフォンでベッドを操作できます。

「ベッド操作アプリ」で、付属の手元スイッチと同じようにベッドを操作できます。一人ひとりの使いやすさに配慮し、ボタンの大きさなどが異なる3タイプの画面が選べます。 ※コントローラー画面は、ベッドの機種によって異なります。

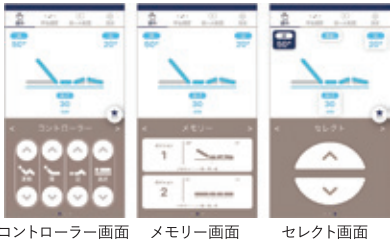

音声操作や外部スイッチ(入力スイッチ)での操作に対応。iOSのみに対応

指先でボタン操作が難しい方でも、あらかじめ登録した言葉を順番に話すことでベッドの操作ができる機能と、身体が不自由な方の身体機能に対応した外部の操作スイッチ(入力スイッチ)と連携できる機能を「ベッド操作アプリ」に搭載しています。

※別途、iOS/iPadOS端末(iPhone/iPad/iPod Touch)、外部操作スイッチ(入力スイッチ)、入力スイッチに端末を接続するスイッチインターフェイスが必要です。

スマートフォンでこちらのQRコードを読み取ることで、ダウンロードページにアクセスできます。

※アプリのダウンロードおよびご利用時には別途通信料がかかります。お客様のご負担となります。
※Apple IDやGoogleアカウントは、お客様自身でご確認ください。

パラマウントベッド

ご利用者様とご家族のための「ベッド操作アプリ」



パラマウントベッド

福祉用具貸与事業者様のための「事業者サポートアプリ」



※Bluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。※AppleおよびAppleのロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。※GoogleおよびGoogle Playのロゴは、Google LLCの商標です。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

操作方法を動画で確認できます。

初めて介護用電動ベッドをお使いになる方にも分かりやすいように、手元スイッチのボタンごとに1つの動画で説明しています。



クオラONEなら、豊富なオプションでさまざまな目的に対応します。

エバーフィットC3マットレス・通気タイプ

体圧分散による快適性と利便性を両立させたリバーシブルマットレスです。

■ レギュラー			
KE-611TQ	91cm幅	00170-001042	¥95,700(税抜¥87,000)
KE-613TQ	83cm幅	00170-001044	¥95,700(税抜¥87,000)
■ ミニ			
KE-612TQ	91cm幅	00170-001043	¥95,700(税抜¥87,000)
KE-614TQ	83cm幅	00170-001045	¥95,700(税抜¥87,000)

◎材質:側地/ポリエステル100% クッション材/ポリエステル・ポリウレタン
◎寸法:KE-611TQ/(幅)91×(長)191×(厚)10cm KE-613TQ/(幅)83×(長)191×(厚)17cm
KE-612TQ/(幅)91×(長)180×(厚)10cm KE-614TQ/(幅)83×(長)180×(厚)10cm

*マットレスは非課税のベッドとセットで購入する場合に限り、非課税となります。

エアマットレス ここちあ利楽flow・清拭タイプ

体重設定から体位変換、姿勢保持まで全自動で行う床ずれ防止エアマットレスです。

■ レギュラー			
KE-911S	91cm幅	00170-001351	オープン価格(非課税)
KE-913S	83cm幅	00170-001353	オープン価格(非課税)
■ ミニ			
KE-912S	91cm幅	00170-001352	オープン価格(非課税)
KE-914S	83cm幅	00170-001354	オープン価格(非課税)

◎材質:側地(トップ)/ポリエステル70%、ポリウレタン30% 側地(ボトム)/ポリエステル90%、ポリウレタン10% チューブ/塩化ビニル エアセル/ポリウレタン カブリリング/PC-PBT樹脂 ボンブケース/ABS樹脂
◎寸法:KE-911S/(幅)91×(長)191×(厚)17cm KE-913S/(幅)83×(長)191×(厚)17cm
KE-912S/(幅)91×(長)180×(厚)17cm KE-914S/(幅)83×(長)180×(厚)17cm

ベッドサイドレール JIS認証取得

ベッドからの転落や、寝具の落下を予防します。

KS-161Q	ホワイトアイボリー／2本組	00170-000527	¥23,100(税抜¥21,000)
◎全長96.4×全高50.3cm			
KS-171Q	ホワイトアイボリー／2本組	00170-000529	¥23,100(税抜¥21,000)
◎全長96.4×全高56.3cm			
*ベッドサイドレールは非課税のベッドとセットで購入する場合に限り、非課税となります。			

スイングアーム介助バー JIS認証取得

ベッドにしっかりと固定できる、さまざまな用途に対応する開閉式の手すりです。

KS-099A	ホワイトアイボリー／1本	00170-001205	¥69,300(税抜¥63,000)
◎全長112.0×全高52.1cm			

サイドグリップ JIS認証取得

ベッドにしっかりと固定できる、開閉部のないコンパクトな手すりです。

KS-030A	ホワイトアイボリー／1本	00170-000897	¥38,500(税抜¥35,000)
◎全長82.2×全高52.3cm			

ベッドサイドテーブル

壁ぎわに設置したベッドでも使え、高さ調節もレバー操作で簡単におこなえます。

KF-1920	アイボリー	00170-000716	¥70,400(税抜¥64,000)
KF-1930	ミディアム	00170-000751	¥74,800(税抜¥68,000)
KF-1950	ピーチ	00170-000717	¥74,800(税抜¥68,000)
KF-1960	チェリー	00170-000718	¥74,800(税抜¥68,000)
KF-1970	ウォールナット	00170-000719	¥74,800(税抜¥68,000)
◎全幅90.7×奥行44.5×全高61～92.5cm/無段階(天板・幅90×奥行40cm) ◎耐荷重30kg			

キャスター JIS認証取得

向きを変えたいときや掃除をするときに便利です。すべてにストッパー付き。

KQ-PB3C(3M、2M、1M高用)	00170-001516	¥26,400(税抜¥24,000)
KQ-PB1C(1M背用)	00170-001517	¥15,400(税抜¥14,000)
*KQ-PB3Cを取り付けてもベッドの高さは変わりません。KQ-PB1Cを取り付けるとベッドの高さは6cm高くなります。*キャスターを取り付けて非課税のベッドを購入する場合、ベッド本体は課税となります。		

ハイトスぺーサー JIS認証取得

ベッドを7cm高くして、32・36・40cmの3段機に組み換えられます。

KQ-PB1H(1M背用)	00170-001518	¥9,680(税抜¥8,800)
*ハイトスぺーサーは非課税のベッドとセットで購入する場合に限り、非課税となります。		

延長フレーム JIS認証取得

ベッドの長さを足側に14センチ延長できます。

KQ-PB60L(83cm幅用)	00170-001519	オープン価格
KQ-PB62L(91cm幅用)	00170-001520	オープン価格
*別売の延長マットレスが必要です。*延長フレームは非課税のベッドとセットで購入する場合に限り、非課税となります。		

スマートハンドル

停電などの緊急時に、ベッドを水平に戻すことができます。
*ベッドの高さを上げることはできません。

KQ-P70S	オープン価格
---------	--------

呼出受信機

スマートフォンがなくても手元スイッチからの呼出を受信できます。

KQ-PA0J	オープン価格
---------	--------

JIS認証取得 マークのある製品は、クオラONEシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しています。

掲載した以外にもさまざまなオプション製品を用意しています。パラマウントベッド「在宅介護向け福祉用具カタログ」からお選びください。